




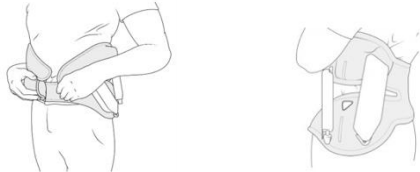

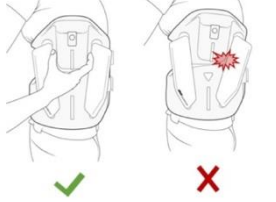

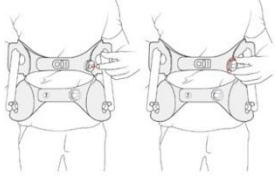



Phase 1 : Mise en service & Formation

Guide d'installation :

<p>Positionner</p>	<p>Attacher les velcros sans serrer pour bien positionner le dispositif sur les hanches</p>	
<p>Vérifier</p>	<p>Vérifier la symétrie et le bon positionnement via l'alignement des indicateurs</p>	
<p>Serrer</p>	<p>Presser les enrouleurs et les tourner afin de serrer le dispositif</p>	
<p>Allumer</p>	<p>Presser sur le bouton ON/OFF jusqu'au signal sonore pour l'allumer</p>	 ON / OFF mise en marche / arrêt du dispositif
<p>Choisir son palier</p>	<p>Sélectionner votre niveau de décompression en appuyant sur les boutons PLUS et MOINS</p>	 <ul style="list-style-type: none"> augmenter la force de décompression diminuer la force de décompression  <ul style="list-style-type: none"> indicateur de force de décompression

Guide de désinstallation :

<p>Diminuer les paliers</p>	<p>Appuyer sur le bouton MOINS jusqu'à ce que toutes les LEDs soient éteintes</p>	 <ul style="list-style-type: none"> augmenter la force de décompression diminuer la force de décompression  <ul style="list-style-type: none"> indicateur de force de décompression
<p>Desserrer</p>	<p>Ouvrir les enrouleurs pour desserrer l'exosquelette</p>	
<p>Retirer</p>	<p>Retirer l'exosquelette en ouvrant les velcros</p>	
<p>Éteindre</p>	<p>Presser sur le bouton ON/OFF jusqu'au signal sonore pour éteindre</p>	 ON / OFF mise en marche / arrêt du dispositif