


CERTIFICAT DE FORMATION UTILISATEUR

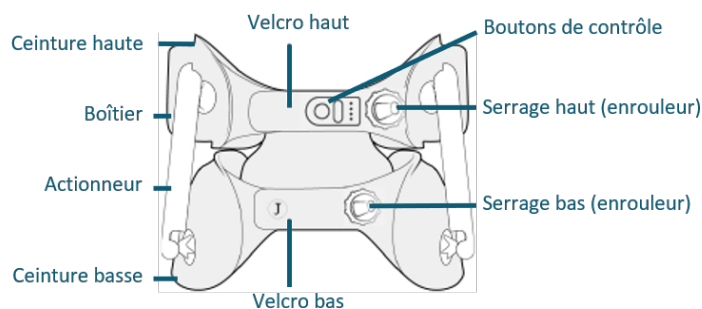

Numéroter de 1 à 6 les étapes d'installation :

- 1 J'installe la batterie après avoir vérifié le niveau de charge
- 5 J'allume le dispositif
- 2 J'attache les velcros et positionne le dispositif
- 4 J'appuie sur les enrouleurs et serre le dispositif
- 6 Je choisis mon niveau de décompression
- 3 Je vérifie le positionnement symétrique du dispositif

Sur chaque ligne, cocher parmi les 2 propositions la bonne affirmation.

<input type="checkbox"/> J'attache les velcros avant pour serrer fortement le dispositif sur le corps.	<input checked="" type="checkbox"/> J'attache les velcros avant pour bien positionner le dispositif sur les hanches.
<input checked="" type="checkbox"/> Le dispositif prend appui sur les hanches.	<input type="checkbox"/> Le dispositif prend appui sur la taille.
<input checked="" type="checkbox"/> Pour vérifier le positionnement symétrique du dispositif, les lignes hautes et basses sont alignées entre elles et la ligne basse est alignée à la couture du pantalon.	<input type="checkbox"/> Pour vérifier le positionnement symétrique du dispositif, seule la ligne basse doit être alignée à la couture du pantalon.
<input checked="" type="checkbox"/> Je suis capable de lever la jambe à 90°	<input type="checkbox"/> Le dispositif me bloque quand je lève la jambe à 90°

Numéroter de 1 à 6 les étapes de désinstallation :

- 1 Je diminue les niveaux de décompression jusqu'à ce que toutes les LEDs soient éteintes
- 4 J'éteins le dispositif
- 2 J'ouvre les enrouleurs pour desserrer le dispositif
- 5 Je retire la batterie
- 3 Je déscratche le dispositif pour le retirer
- 6 Je désinfecte le dispositif

Cocher les bonnes affirmations, si le dispositif n'est pas suffisamment serré :

- Les tiges des actionneurs se déploient fortement dès le premier niveau (plus de 5cm)
- Les tiges des actionneurs se déploient légèrement au premier niveau (moins de 1cm)
- Le dispositif glisse sur le corps
- Le dispositif est quand même utile